


# PROLONGATEURS SECUR-LOK™ MIC-KEY® ENFit™ UTILISATION

Recommandations concernant les manipulations du **prolongateur Secur-Lok™ MIC-KEY® ENFit™**.

## 1 BRANCHEMENT DU PROLONGATEUR SECUR-LOK™ ENFit™ SUR LE BOUTON MIC-KEY®

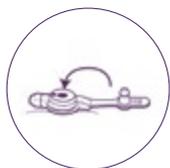

Ouvrir le capuchon.




Aligner les repères noirs.



Faire une rotation de 3/4 de tour dans le sens horaire.

Remplacer le prolongateur toutes les semaines\*.

## 2a ADMINISTRATION VIA LA SERINGUE ENFit™

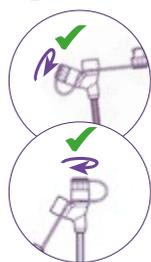

**Veiller à bien fermer le site de connexion non utilisé du prolongateur.**  
Pour cela, visser le capuchon à l'intérieur du site non utilisé en effectuant une rotation de celui-ci afin de le verrouiller.



Connecter la seringue ENFit™ sur le site de connexion du prolongateur en vissant celle-ci dans le sens horaire.



Commencer l'administration.

## 2b ADMINISTRATION VIA LA TUBULURE DE NUTRITION ENFit™



**Veiller à bien fermer le site de connexion latéral du prolongateur.**  
Pour cela, visser le capuchon à l'intérieur du site latéral en effectuant une rotation de celui-ci afin de le verrouiller.




Connecter la tubulure de nutrition ENFit™ sur le site droit du prolongateur en vissant celle-ci dans le sens horaire.



Commencer l'administration.


## 3 DÉBRANCHEMENT DU PROLONGATEUR SECUR-LOK™ ENFit™ SUR LE BOUTON MIC-KEY®

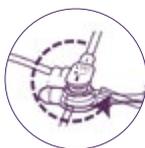

Une fois l'administration terminée, effectuer une rotation de 3/4 de tour.



Déconnecter le prolongateur.

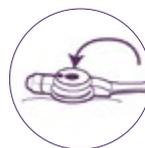

Refermer le capuchon du site de connexion du bouton.



Après chaque utilisation, nettoyer le prolongateur à l'eau et au savon. Rincer et laisser-le sécher.

\*Conformément aux recommandations de la SFNCM et à l'Arrêté du Journal Officiel du 17/11/09

