

PNEUMOLOGIE
ENDOSCOPIE

SONOTIP® TOP GAIN

Aiguille de ponction sous écho-endoscopie bronchique



► Présentation technique

Aiguille FNB

- Qualité et rendement du prélèvement¹ de tissu



Aiguille sablée

- Amélioration de la visibilité lors de la procédure

Gaine plastique bleue foncée

- Flexibilité et visualisation macroscopique

Stylet Luer Lock en nitinol

- Réintroduction en limitant le risque de plicature

Bague Twist Lock « aiguille »

- Ajustement de la longueur requise de l'aiguille (0 à 4 cm)

Stylet rond

- Protection du canal opérateur de l'écho-endoscope

Poignée ergonomique

- Prise en main et maniement facilités

Version Pentax



Version Olympus / Fujifilm²

Version FLEX (nitinol)

- Amélioration de la progression et de la ponction
- Une aiguille droite pour une ponction précise¹

Bague Twist Lock « gaine »


- Ajustement de la longueur de la gaine

¹ Source : Die endosonographische Feinnadelpunktion Eine Einführung für Assistenzpersonal in der Endoskopie - Birgitt Lucke, Christian Jenssen

² Mettre l'adaptateur fourni dans l'emballage pour la compatibilité avec l'endoscope FUJINON


► Procédure d'utilisation

RÉGLAGE DE LA GAINE

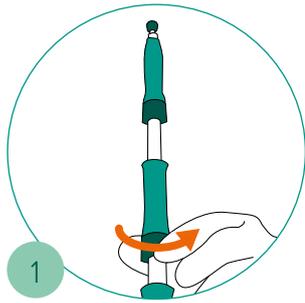


Déverrouiller

- La bague "Twist lock gaine" en pivotant d'1/4 de tour

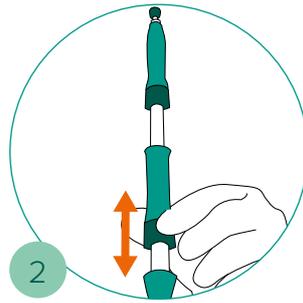

Ajuster


- La longueur de la gaine bleue foncée jusqu'à l'apercevoir à l'écran (2mm environ vision endoscopique)

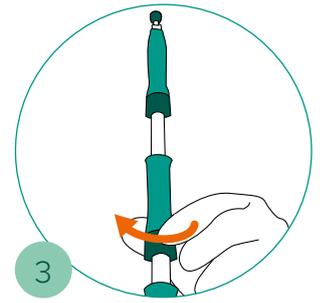

Verrouiller


- La bague "Twist lock gaine" en pivotant dans le sens inverse

RÉGLAGE DE L'AIGUILLE

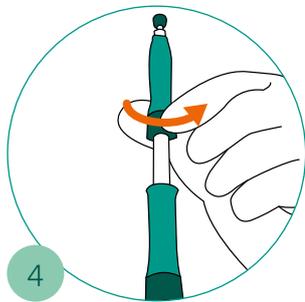

Dévisser

- La bague "Twist lock aiguille" puis faire avancer la poignée jusqu'à apercevoir l'aiguille et le mandrin à l'écran

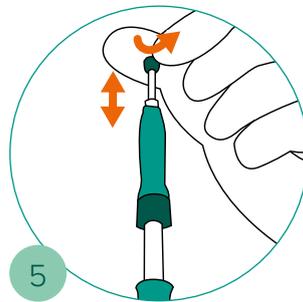

Dévisser

- Le mandrin (stylet) et le retirer de 5mm maximum

LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	EMBOUT AIGUILLE	AIGUILLE	LG TRAVAIL	RÉFÉRENCES PENTAX		RÉFÉRENCES OLYMPUS/FUJI	
				Commande	Produit	Commande	Produit
SONOTIP® TOP GAIN 22 G Ø externe : 1,8 mm Lg protection aiguille : 40 mm	Grenailé à la bille de verre	Nitinol	670-710 mm	222536	GUB - 42 - 18 - 022	-	-
	Grenailé à la bille de verre	Nitinol	690-730 mm	-	-	222537 *	GUB - 46 - 18 - 022
	Coupé au laser	Acier inoxydable	690-730 mm	-	-	222538 *	GUB - 45 - 18 - 022

Conditionnement : boîte de 5 unités. Présence d'une seringue de 20ml avec l'aiguille - * Adaptateur fourni



9, Avenue Mercure - 31130 Quint Fonsegrives
+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01



DÉCOUVREZ NOTRE SITE SUR
www.aseptinmed.fr

