

SONOTIP® EBUS PRO

Aiguille de ponction sous écho-endoscopie bronchique

► Présentation technique

Aiguille biseautée à 12°

- Qualité et rendement du prélèvement¹

Aiguille sablée

- Amélioration de la visibilité

Gaine plastique bleue foncée

- Flexibilité et visualisation macroscopique

Poignée ergonomique

- Prise en main et maniement facilités

Stylet Luer Lock en nitinol

- Réintroduction en limitant le risque de plicature

Bague Twist Lock « aiguille »

- Ajustement de la longueur requise de l'aiguille (0 à 4 cm)

Stylet rond

- Protection du canal opérateur de l'écho-endoscope



Version Pentax



Version Olympus / Fuji²

Bague Twist Lock « gaine »

- Ajustement de la longueur de la gaine

Version FLEX (nitinol)


- Amélioration de la progression et de la ponction
- Diminution de l'effet banane¹

¹ Source : Die endosonographische Feinnadelpunktion Eine Einführung für Assistenzpersonal in der Endoskopie - Birgitt Lucke, Christian Jenssen

² Mettre l'adaptateur fourni dans l'emballage pour la compatibilité avec l'endoscope FUJINON


► Procédure d'utilisation

RÉGLAGE DE LA GAINE

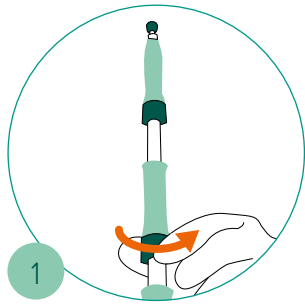


Déverrouiller

- La bague "Twist lock gaine" en pivotant d'1/4 de tour

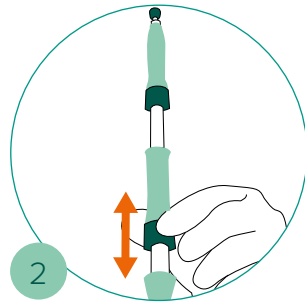

Ajuster


- La longueur de la gaine bleue foncée jusqu'à l'apercevoir à l'écran (2mm environ vision endoscopique)

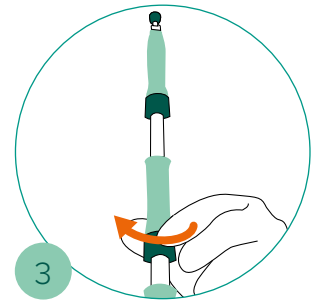

Verrouiller


- La bague "Twist lock gaine" en pivotant dans le sens inverse

RÉGLAGE DE L'AIGUILLE

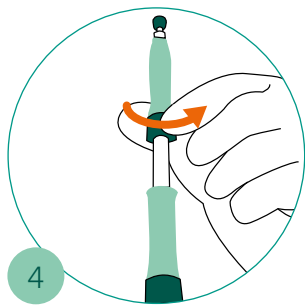

Dévisser

- La bague "Twist lock aiguille" puis faire avancer la poignée jusqu'à apercevoir l'aiguille et le mandrin à l'écran

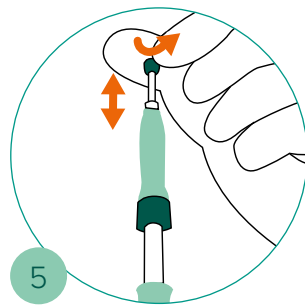

Dévisser

- Le mandrin (stylet) et le retirer de 5mm maximum

LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	VERSION	AIGUILLE	RÉFÉRENCES PENTAX		RÉFÉRENCES OLYMPUS/FUJI	
			Commande	Produit	Commande	Produit
SONOTIP® EBUS PRO 22 G	Standard	Acier inoxydable	222706	GUS-41-18-022	220811	(1) GUS - 45 - 18 - 022
	Flex	Nitinol	220812	GUS - 42 - 18 - 022	220810	(2) GUS - 46 - 18 - 022

Conditionnement : boîte de 5 unités.

(1) Compatibilité Olympus : BF-UC-180F et BF-UC-190F

(2) Compatibilité Olympus : BF-UC-180F



9, Avenue Mercure, 31130 Quint Fonsegrives
+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01



SCANNEZ
POUR ACCÉDER AU
CONTENU EN LIGNE
www.aseptinmed.fr

